

LAWTUS ADENT CLEANSER (ASİDİK DETERJAN)

KULLANIMA HAZIR

DENTAL ÖLÇÜ KAŞIĞI VE ALJİNAT TEMİZLEME SOLÜSYONU

MAMÜL BİLEŞİMİ:

< % 5 Anyonik Yüzey Aktif Madde , < % 5 Katyonik Yüzey Aktif Madde, < % 5 Potasyum Hidroksit, Bitkisel Ekstrat, < % 5 Fosforik Asit, < % 5 Sitrik Asit, Korozyon İnhibitörü, De iyonize Su, Parfüm

ÜRÜN BİLEŞİMİNDE : ALDEHİT-BENZEN- HALOJEN- TOLUEN-KLORİN- ALKOL BULUNMAZ...

KULLANIM ALANLARI:

Dental alanda kullanılan Paslanmaz Çelik (304/ 316/420 vb.), Krom Nikel kaplama ve alüminyum; Dental cerrahi el aletleri- Siman camları ve Ölçü kasıkları yüzeylerin de; Oluşan Organik; (Kan, Kemik, Doku parçaları, Vücut sıvıları, Tükürük vb.) ve İnorganik (Siman- Çinko Fosfat- Çinko Oksit - Aljinat, Mn, Serum fizyolojik, Antiseptik ve benzeri), kirliliklerin tamamını temizler.

Başka yüzeylerin temizliğinde kullanılmaz...

ÖNEMLİ : TEMİZLEME İŞLEMİNDEN SONRA ;

MUTLAKA DURULAMA , DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON İŞLEMİNE TABİ TUTUNUZ !

KULLANIM ŞEKLİ

SOLÜSYON KULLANIMA HAZIRDIR. SULANDIRMA İŞLEMİ YAPILMADAN DİREKT KULLANILIR.

TEMİZLEME İŞLEMİ ULTRASONİK MAKİNELERDE;

Temizlenecek yüzeylerin kirlilik derecesine göre; 45 –65 °C de 5-10 dakika içerisinde, temizleme işlemi gerçekleşir.

MANUEL OLARAK İSE;

Temizlenecek yüzeylerin kirlilik derecesine göre (Oda sıcaklığında)15-55 dakika içerisinde, temizleme işlemi gerçekleşir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

- Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
- Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.
- Göz ,le temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- Uygun eldiven giyin.
- Koruyucu gözlük / maske kullanın .
- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Gıda maddelerinden uzak tutunuz.
- El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- Başka yüzeylerin temizliğinde kullanmayınız.
- Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.
- Ambalaj tamamen kullanıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz.
- Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi nin (UZEM 114) numaralı telefonu veya Acil sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız.



AYYILDIZ SANAYİ SİTESİ OSB MAH. 1141 SOK.

NO:28 OSTİM—YENİMAHALLE—ANKARA

TEL: +90 312 386 0 363 FAKS: +90 312 386 0364

E-posta ; info@limailac.com.tr

LAWTUS ADENT CLEANSER (ASİDİK DETERJAN)

KULLANIMA HAZIR

DENTAL ÖLÇÜ KAŞIĞI VE ALJİNAT TEMİZLEME SOLÜSYONU



TEMİZLEME ÖNCESİ



TEMİZLEME SONRASI


Temizleme, objelerden yabancı maddelerin (örneğin kir, organik maddeler gibi) çıkarılmasıdır ve normalde su ve deterjanlar ya da enzimatik ürünler kullanılarak gerçekleştirilir. Yüksek düzeyde bir dezenfektasyon ve sterilizasyondan önce kapsamlı bir temizlik işlemi yapılması gerekir, çünkü aletlerin yüzeylerinde kalan inorganik ve organik materyaller bu proseslerin etkinliklerini engeller.



TEMİZLEME ÖNCESİ



TEMİZLEME SONRASI

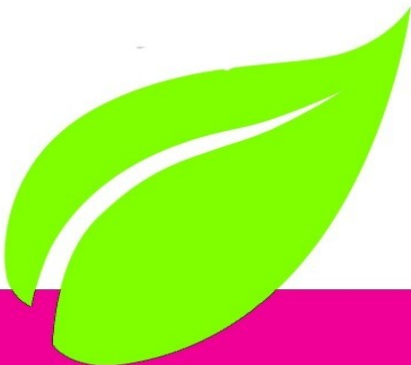

LIMA

İLAÇ SAĞLIK EKİPMANLARI ÜRÜNLERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AYYILDIZ SANAYİ SİTESİ OSB MAH. 1141 SOK.

NO:28 OSTİM—YENİMAHALLE—ANKARA

TEL: +90 312 386 0 363 FAKS: +90 312 386 0364

E-posta ; info@limailac.com.tr

LAWTUS ADENT CLEANSER (ASİDİK DETERJAN)

KULLANIMA HAZIR

DENTAL ÖLÇÜ KAŞIĞI VE ALJİNAT TEMİZLEME SOLÜSYONU




TEMİZLEME ÖNCESİ



TEMİZLEME SONRASI


Diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin uygulanması ve kullanımı aşamalarında toksik ve allerjik olmaması hekim ve hastanın zarar görmemesi açısından büyük önem taşır. Akrilik rezinlerin polimerizasyonları sonrasında ortaya çıkan artım monomer miktarı ve cinsi, simanların diş dokusuna uygulanmaları sırasındaki pH'sının düşük oluşu, metal alaşımlardaki allerjik ve toksik bileşenler veya bunların ağız ortamında korozyona uğraması malzemelerin biyolojik özelliklerini kötü yönde etkiler.

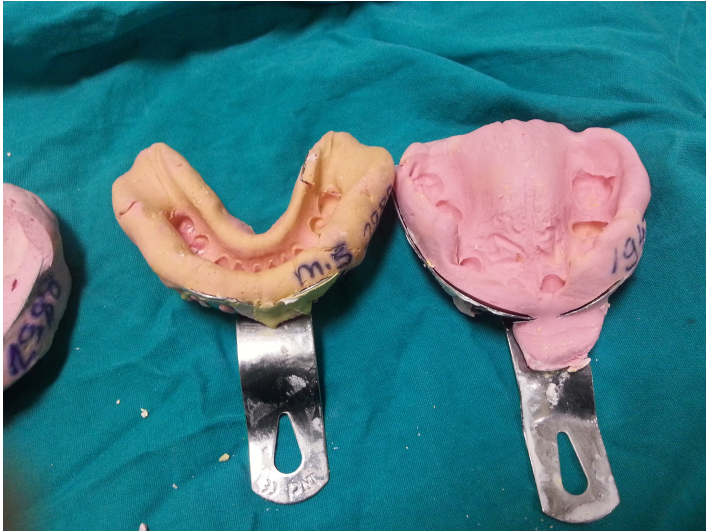

TEMİZLEME ÖNCESİ



TEMİZLEME SONRASI

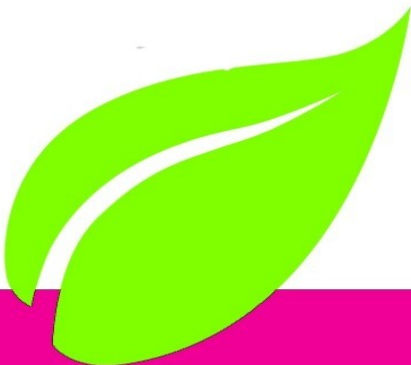

LIMA

İLAC SAĞLIK EKİPMANLARI ÜRÜNLERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ

AYYILDIZ SANAYİ SİTESİ OSB MAH. 1141 SOK.

NO:28 OSTİM—YENİMAHALLE—ANKARA

TEL: +90 312 386 0 363 FAKS: +90 312 386 0364

E-posta ; info@limailac.com.tr